

# Absorin Sanette

Voor matig tot zwaar urine- en ontlastingsverlies



Absorin Sanette is een inlegverband voor zowel mannen als vrouwen die nog volledig zelfstandig zijn en ook zeer geschikt voor mensen die (volledig) afhankelijk zijn van zorg. Het kan dag en nacht gedragen worden en sluit onder alle omstandigheden perfect aan op het lichaam.

Het inlegverband kan met eigen (goed aansluitend) elastisch ondergoed gedragen worden of met een Absorin fixatiebroekje.

## Wij helpen u graag met een deskundig advies

Heeft u na het lezen van de informatie nog inhoudelijke vragen? Wilt u een advies op maat voor (een van) uw cliënt(en)? Of wilt u dat wij langskomen voor het geven van aanleginstructies? Neem dan contact op met onze Klantenservice. Onze Klantenservice voor Zorgprofessionals is iedere werkdag bereikbaar van 08.30 tot 17.15 uur via 0800 - 6 226 226.

## Consumenten

Wilt u meer weten over het gebruik van Absorin producten of een deskundig advies? Neem dan contact op met onze gespecialiseerde medewerkers van de Klantenservice Continentiezorg via telefoonnummer 0800 – 2004. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 – 17.00. Of stuur een e-mail naar [info@mediqcombicare.nl](mailto:info@mediqcombicare.nl)

## Kijk ook op [www.absorin.nl](http://www.absorin.nl)

U kunt de productinformatie van Absorin Sanette en onze andere producten ook nalezen op onze website.

## Mediq

Rijnzathe 10  
3454 PV De Meern

Postbus 20003  
3502 LA Utrecht

Continentiezorg Klantenservice: 0800 - 2004

[www.absorin.nl](http://www.absorin.nl)

Druk- en zetfouten voorbehouden. Mediq behoudt zich te allen tijde, het recht voor haar producten en assortiment te wijzigen.

## Absorin Sanette



### Perfect Fit

Absorin Sanette is geschikt voor mannen en vrouwen. Door de anatomische vorm sluit het product perfect aan op het lichaam. De combinatie met de Absorin fixatiebroek, die in verschillende maten verkrijgbaar is, maakt de Sanette geschikt voor alle maten. Van zeer tengere tot obese gebruikers.

### Cottonfeel & Ademend

De Cottonfeel buitenlaag voelt zacht als katoen en knispert niet. Het heeft een ademend effect, zónder dat het vocht doorlaat. Het zachte absorptiekussen voorkomt drukplekken en zorgt voor extra draagcomfort.

### Anti-lekrandjes

Speciale vochtwerende anti-lekrandjes zorgen dat grote hoeveelheden urine binnen het verband blijven. Ook bij dunne ontlasting voorkomen de anti-lekrandjes lekkage. Belangrijk is dat het product voor het aanbrengen op de juiste manier 'geactiveerd' wordt. Zie hiervoor de aanleginstructies.

### Urine-indicator

Absorin Sanette heeft op de buitenzijde een urine-indicator. Wanneer deze (grotendeels) van kleur is veranderd, is het verband verzadigd en moet deze verwisseld worden.

### Fast Dry Concept

Alle producten van Absorin zijn samengesteld volgens het Fast Dry Concept. Dankzij de opbouw in 5-lagen wordt de urine snel opgenomen, blijft de huid droog en wordt lekkage en huidletsel voorkomen. Deze unieke samenstelling biedt de gebruiker discretie, comfort en zekerheid.

### Assortiment

Elke cliënt en elke zorgsituatie is anders. De verschillen zitten vaak in de details: de juiste maatvoering, een hogere absorptiecapaciteit of handige extra's voor nog meer gebruiksgemak. Het uitgebreide assortiment Absorin Sanette biedt dit allemaal.

Absorin Sanette is verkrijgbaar in verschillende maten en absorptiecapaciteiten.

REF nummer	Omschrijving	Lengte	Absorptie*	Inhoud tas	Inhoud doos	ZI-nummer
10517308	Sanette Day Light Blauw	55 cm	1.250 ml	20 st.	4 x 20 st.	16222636
10517310	Sanette Day Zacht Blauw	55 cm	1.580 ml	20 st.	4 x 20 st.	16222644
10517320	Sanette Day Extra Groen	63 cm	2.150 ml	20 st.	4 x 20 st.	16222652
10517330	Sanette Night Paars	63 cm	2.600 ml	20 st.	4 x 20 st.	16222660
10517340	Sanette Heavy Geel	63 cm	3.350 ml	20 st.	4 x 20 st.	16222679
10517350	Sanette Ultra Grijs	63 cm	3.500 ml	20 st.	4 x 20 st.	16222687
-	Fixatiebroekje	-	-	-	-	-
-	Fixatiebroekje	-	-	-	-	-
-	Fixatiebroekje	-	-	-	-	-
-	Fixatiebroekje	-	-	-	-	-
-	Fixatiebroekje	-	-	-	-	-

\*Aantal milliliters volgens de ISO-normering. ISO is een standaard uniforme meetwijze voor het bepalen van de maximale opname van het product.

### Vorbereiding

Absorin Sanette wordt gefixeerd met goed aansluitend elastisch ondergoed of een speciaal fixatiebroekje zoals Absorin Fix. Hiermee wordt de kans op lekkage voorkomen.

### Verband wisselen

Via de urine-indicator op de buitenzijde van de Sanette kunt u controleren of het product verzadigd is. Wanneer de indicator grotendeels van kleur veranderd is, moet het verband verwisseld worden.

### Huidverzorging

Zorg dat de huid goed schoon en droog is. Gebruik geen zeep maar alleen water of een zeepvrije, pH-neutrale waslotion (bijvoorbeeld Klinion Personal Care Wash Lotion). U kunt de huid beschermen met Klinion Personal Care Barrier Cream.

### Ontlastingsverlies

Verwissel de Sanette bij ontlastingsverlies zo snel mogelijk om huidirritatie te voorkomen. Ontlasting wordt namelijk niet opgenomen door het verband.

### Optimale hygiëne

Voor optimale hygiëne moet het verband van voren naar achteren verwijderd worden. Hiermee wordt voorkomen dat er ontlasting in de vagina terecht komt.

Aanleggen Absorin Sanette staand	Aanleggen Absorin Sanette liggend
<p>Trek het fixatiebroekje aan tot halverwege de bovenbenen. Sla de bovenkant van het broekje terug.</p>	<p>Draai de cliënt op de zij en trek het fixatiebroekje naar beneden om het inlegverband van voor naar achteren te verwijderen.</p>
<p>Vouw de Sanette dubbel over de lengte, zodat er een komvorm ontstaat.</p>	<p>Vouw de nieuwe Sanette dubbel over de lengte, zodat er een komvorm ontstaat.</p>
<p>Trek de Sanette van voor naar achter aan, waarbij de grote boog achter boven de bilnaad uitkomt.</p>	<p>Doe de Sanette van voor naar achter aan, waarbij de grote boog achter boven de bilnaad uit komt.</p>
<p>Vouw de Sanette plat over de billen uit en trek de achterkant van het broekje omhoog.</p>	<p>Vouw de Sanette plat over de billen uit en trek de achterkant van het broekje omhoog.</p>
<p>Haal met een zigzagbeweging de voorkant van de Sanette naar voren, zodat het product goed aansluit in de liezen. Vouw de voorkant plat op de buik uit.</p>	<p>Haal met een zigzagbeweging de voorkant van de Sanette naar voren, zodat het product goed aansluit in de liezen. Vouw de voorkant plat op de buik uit.</p>
<p>Trek de voorkant van het fixatiebroekje omhoog en zorg ervoor dat het broekje aansluit in de liezen. Haal zo nodig de huidplooien buiten het fixatiebroekje.</p>	<p>Trek de voorkant van het fixatiebroekje omhoog en zorg ervoor dat het broekje aansluit in de liezen. Haal zo nodig de huidplooien buiten het fixatiebroekje.</p>