

Absorin Slip

Voor matig tot zeer zwaar urine- en/of ontlastingsverlies



Absorin Slip is een eendelig, absorberend verband dat geschikt is voor zowel mannen als vrouwen, en wordt gefixeerd met vier fixatiestrips. Het kan dag en nacht gedragen worden en sluit perfect aan op het lichaam.

Wij helpen u graag met een deskundig advies

Heeft u na het lezen van de informatie nog inhoudelijke vragen? Wilt u een advies op maat voor (een van) uw cliënt(en)? Of wilt u dat wij langskomen voor het geven van aanleginstructies? Neem dan contact op met onze Klantenservice. Onze Klantenservice voor Zorgprofessionals is iedere werkdag bereikbaar van 08.30 tot 17.15 uur via 0800 - 6 226 226.

Consumenten

Wilt u meer weten over het gebruik van Absorin producten of een deskundig advies? Neem dan contact op met onze gespecialiseerde medewerkers van de Klantenservice Continentiezorg via telefoonnummer 0800 – 2004. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 – 17.00. Of stuur een e-mail naar info@mediqcombicare.nl

Kijk ook op www.absorin.nl

U kunt de productinformatie van Absorin Slip en onze andere producten ook nalezen op onze website.

Mediq

Rijnzathe 10
3454 PV De Meern

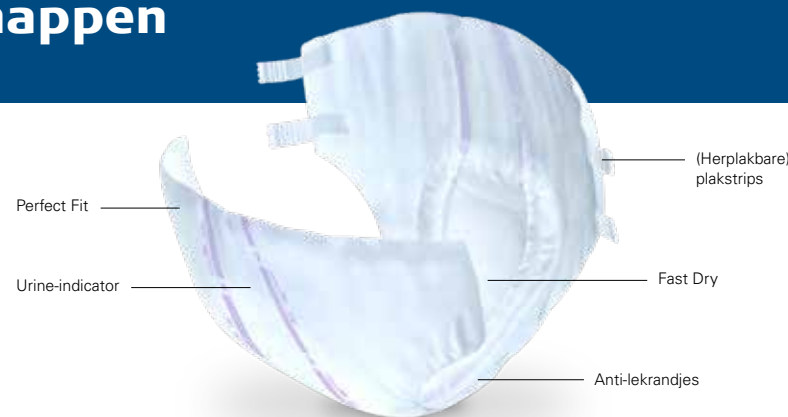
Postbus 20003
3502 LA Utrecht

Continentiezorg Klantenservice: 0800 - 2004

www.absorin.nl

Druk- en zetfouten voorbehouden. Mediq behoudt zich te allen tijde, het recht voor haar producten en assortiment te wijzigen.

Absorin Slip



Perfect Fit

Door de anatomische vorm en volledige omsluiting rond bovenbeen én heup sluit het product perfect aan op het lichaam. Absorin Slip is eenvoudig te gebruiken door zowel mannen als vrouwen en verkrijgbaar in verschillende maten en absorptieniveaus.

Cottonfeel & Ademend

De Cottonfeel buitenlaag voelt zacht als katoen en knispt niet. Het heeft een ademend effect, zónder dat het vocht doorlaat. Het zachte absorptiekussen voorkomt drukplekken en zorgt voor extra draagcomfort.

Anti-lekrandjes

Speciale vochtwerende anti-lekrandjes zorgen dat grote hoeveelheden urine binnen het verband blijven. Ook bij dunne ontlasting voorkomen de anti-lekrandjes lekkage.

Urine-indicator

Absorin Slip heeft op de buitenzijde een urine-indicator. Wanneer deze (grotendeels) van kleur is veranderd, is het verband verzadigd en moet deze verwisseld worden.

Fast Dry Concept

Alle producten van Absorin zijn samengesteld volgens het Fast Dry Concept. Dankzij de opbouw in 5-lagen wordt de urine snel opgenomen, blijft de huid droog en wordt lekkage en huidletsel voorkomen. Deze unieke samenstelling biedt de gebruiker discretie, comfort en zekerheid.

Assortiment

Elke cliënt en elke zorgsituatie is anders. De verschillen zitten vaak in de details: de juiste maatvoering, een hogere absorptiecapaciteit of handige extra's voor nog meer gebruiksgemak. Het uitgebreide assortiment Absorin Slip biedt dit allemaal.

Gebruik

Zorg dat u altijd de juiste maatvoering en absorptiecapaciteit van Absorin Slip gebruikt. Met behulp van het Absorin meetlint kunt u de heupomvang bepalen en het juiste product selecteren.

Absorin Slip is verkrijgbaar in 15 verschillende maten en absorptiecapaciteiten.

REF nummer	Omschrijving	Heupomvang	Absorptie*	Inhoud tas	Inhoud doos	ZI-nummer
0805	Slip Day XXS	tot 60 cm	1.260 ml	44 st.	3 x 44 st.	14843501
0808-A	Slip Day XS	tot 75 cm	1.550 ml	14 st.	12 x 14 st.	15828336
0720-A	Slip Day M	tot 115 cm	2.200 ml	28 st.	3 x 28 st.	15786862
0730-A	Slip Day L	tot 145 cm	2.300 ml	28 st.	4 x 28 st.	15786889
0840-A	Slip Day XL	tot 170 cm	2.700 ml	20 st.	4 x 20 st.	15827844
0815-A	Slip Day/Night S	tot 90 cm	2.100 ml	14 st.	8 x 14 st.	15786854
0822-A	Slip Day/Night M	tot 115 cm	3.100 ml	28 st.	3 x 28 st.	15786870
0832-A	Slip Day/Night L	tot 145 cm	3.300 ml	28 st.	3 x 28 st.	15786897
0842-A	Slip Day/Night XL	tot 170 cm	3.800 ml	14 st.	4 x 14 st.	15829340
0910-A	Slip Night/Heavy S	tot 90 cm	2.500 ml	20 st.	4 x 20 st.	15974979
0920-A	Slip Night/Heavy M	tot 115 cm	3.700 ml	20 st.	3 x 20 st.	15923576
0930-A	Slip Night/Heavy L	tot 145 cm	4.000 ml	20 st.	3 x 20 st.	15923584
0940-A	Slip Night/Heavy XL	tot 170 cm	4.400 ml	14 st.	4 x 14 st.	15829332
1022-A	Slip Night/Ultra M	tot 115 cm	3.900 ml	15 st.	3 x 15 st.	15974987
1032-A	Slip Night/Ultra L	tot 145 cm	4.400 ml	15 st.	3 x 15 st.	15974995

*Aantal milliliters volgens de ISO-normering. ISO is een standaard uniforme meetwijze voor het bepalen van de maximale opname van het product.

Vorbereiding

Zorg dat u altijd de juiste uitvoering van Absorin Slip gebruikt, om de kans op lekkage en irritatie in de liezen te voorkomen. U heeft de juiste maat als de plakkers zich rond het heupbeen bevinden.

Verband wisselen

Via de urine-indicator op de buitenzijde van de Slip kunt u controleren of het product verzadigd is. Wanneer de indicator grotendeels van kleur veranderd is, moet het verband verwisseld worden. Let op dat bij het verwijderen van de Slip de plakstrips niet aan de huid plakken, om huidbeschadiging te voorkomen. Vouw de plakstrips naar binnen nadat ze zijn losgemaakt en verwijder pas daarna het product.

Huidverzorging









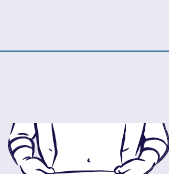

Zorg dat de huid goed schoon en droog is. Gebruik geen zeep maar alleen water of een zeepvrije, huid pH-neutrale waslotion (bijvoorbeeld Klinion Personal Care Wash Lotion). U kunt de huid beschermen met Klinion Personal Care Barrier Cream.

Ontlastingsverlies

Verwissel de Slip bij ontlastingsverlies zo snel mogelijk om huidirritatie te voorkomen. Ontlasting wordt namelijk niet opgenomen door het verband.

Optimale hygiëne

Voor optimale hygiëne moet het verband van voren naar achteren verwijderd worden.

Aanleggen Absorin Slip staand	Aanleggen Absorin Slip liggend
 <p>Maak de Slip helemaal open en vouw deze vervolgens in de lengte goed dubbel zodat er een komvorm ontstaat. Let op dat de anti-lekrandjes omhoog gaan staan!</p>	 <p>Maak de Slip helemaal open en vouw deze vervolgens in de lengte goed dubbel zodat er een komvorm ontstaat. Let op dat de anti-lekrandjes omhoog gaan staan!</p>
 <p>Zorg dat het deel van de Slip waar de plakstrips aan vast zitten aan de rugzijde komt.</p>	 <p>Draai de gebruiker op de zij en plaats de Slip (met plakstrips) onder de rug. Schuif de flap onder de heup. Zorg ervoor dat de absorberende mat precies in het midden van de billen zit en net boven de bilnaad komt.</p>
 <p>Houd de Slip zo hoog dat de absorberende mat enkele centimeters boven de bilnaad uit komt.</p>	 <p>Draai de gebruiker op de rug en vouw de zijflappen uit.</p>
 <p>Vouw de Slip in de lengte dubbel en haal met een zigzaggende beweging de Slip tussen de benen door naar voren tot het product goed (zonder huidplooiën) aansluit in de liezen. Vouw de voorzijde glad uit over de buik, zodat de bovenkant ongeveer tussen het kruis en de navel uitkomt.</p>	 <p>Haal de Slip met een zigzaggende beweging tussen de benen door naar voren tot het product goed (zonder huidplooiën) aansluit in de liezen. Vouw de voorzijde glad uit over de buik, zodat de bovenkant ongeveer tussen het kruis en de navel uitkomt.</p>
 <p>Bevestig eerst de onderste plakstrips schuin omhoog en vervolgens de bovenste plakstrips schuin omlaag. Zitten de plakstrips goed, druk ze dan aan voor optimale fixatie. De plakstrips zijn hersluitbaar. Controleer of de Slip goed aansluit in de liezen en haal eventuele huidplooiën buiten het verband.</p>	 <p>Bevestig eerst de onderste plakstrips schuin omhoog en vervolgens de bovenste plakstrips schuin omlaag. Zitten de plakstrips goed, druk ze dan aan voor optimale fixatie. De plakstrips zijn hersluitbaar. Controleer of de Slip goed aansluit in de liezen en haal eventuele huidplooiën buiten het verband.</p>